

KUIDAS PESSAARI MÕÕTA?

Määratlege prolapsi tüüp ja aste ning vastavalt sellele valige sobiv pessaar.

Mõõtmine

- Pikkus mõõdetakse nimetissõrme ja keskmise sõrme tüpes tehtava günekoloogilise uuringu käigus. Arvestada tuleks pikkust alates häbemeluust kuni tagumise forniksini.
- Laiuse mõõtmine toimub kahe, kolme, nelja või enama sõrme horisontaalselt tuppe sisestamisega.

Paigaldamine

Pessaari vaginaalne sobivus

Kui pessaar on paigaldatud peaks saama ühte sõrme liigutada pessari ja tupeseinte vahel. Kui selleks pole piisavalt ruumi, tuleks proovida väiksemat suurust. Kui tekib liiga palju ruumi, peaks valima suurema suuruse, muidu võib pessaar tüpes liikuda või isegi välja tulla.

Patsiendile sobivus


Paluge patsiendil istuda, seista ja pingutada (kõhida). Patsient ei tohiks pessari pärast paigaldamist tunda. Pessaar ei tohiks olla tüpes liiga vabalt, kuna see võib asendit muuta või välja tulla. Samuti ei tohiks pessaar olla liiga tihedalt tüpes, kuna see võib põhjustada ebamugavust.

MÄRKMED:

Kuubikpessaar

Kasutus: kolmanda astme prolapsi, sh protsidentia, tsüstotseele ja rektotseele korral. Kuubik tuleb ööseks välja võtta.

P

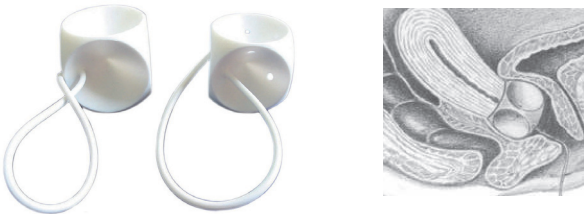

Tootekood Äravooluga	Tootekood Äravooluta	Suuruse nr	mm
050066	050055	#0	25
050067	050056	#1	29
050068	050057	#2	32
050069	050058	#3	36
050070	050059	#4	40
050071	050060	#5	45
050072	050061	#6	49
050073	050062	#7	55
050074	050063	#8	63
050075	050064	#9	69
050076	050065	#10	74

Sõõrikpessaar

Kasutus: teise kuni kolmanda astme prolapsi ning tsüstotseele, rektotseele korral.

P



Tootekood	Suuruse nr	mm
050010	#0	51
050011	#1	57
050012	#2	64
050013	#3	69
050014	#4	76
050015	#5	82
050016	#6	88
050199	#7	95

MEDITSIINILISEST SILIKOONIST MEDGYN® PESSAARID

P PROLAPS

I INKONTINENTS

Pessaaride kasutusaeg 10 aastat

HOIAMED

Tootja MedGyn International Inc
Edasimüüja HoiaMed OÜ
Info ja tellimine
+372 5349 7501
info@hoiamed.ee

Rõngaspessaar

Kasutus: kerge esimese astme prolaps.

P




Tootekood	Suuruse nr	mm
050017	#1	51
050018	#2	57
050019	#3	62
050020	#4	70
050021	#5	74
050022	#6	82
050023	#7	89
050024	#8	96
050025	#9	102

Rõngaspessaar nupuga

Kasutus: kerge esimese astme prolaps kombineeritud uriinipidamatusega.

P I

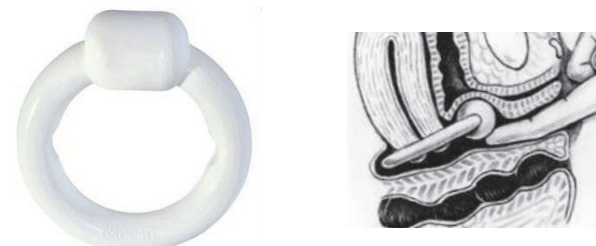


Tootekood	Suuruse nr	mm
050017K	#1	51
050018K	#2	57
050019K	#3	63
050020K	#4	70
050021K	#5	76
050022K	#6	83
050023K	#7	89

Rõngaspessaar toega

Kasutus: kerge esimese astme prolaps tsüstotseelega.

P

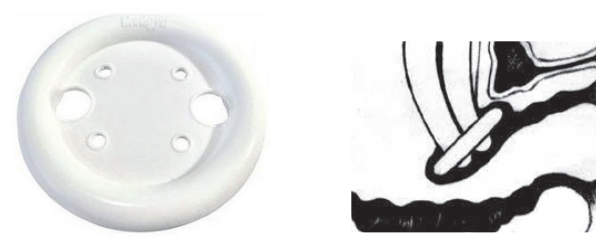

Tootekood	Suuruse nr	mm
050026	#1	51
050027	#2	57
050028	#3	62
050029	#4	70
050030	#5	74
050031	#6	82
050032	#7	89
050033	#8	96
050034	#9	102

Rõngaspessaar nupuga ja toega

Kasutus: kerge prolaps kombineeritud kerge tsüstotseele ja uriinipidamatusega.

P I



Tootekood	Suuruse nr	mm
050026K	#1	51
050027K	#2	57
050028K	#3	63
050029K	#4	70
050030K	#5	76
050031K	#6	83
050032K	#7	89

TELLIMINE

Tellimiseks kasutage käesolevat tootelehte sobiva pessaaari märkimiseks või kirjutage patsiendile välja tootekood, millimeetrid ja nimetus.

Tellimine apteegist

Patsient saab tellida pessaaari apteegist. Apteek tellib arsti poolt määratud sobiva suuruse ja mudeli.

Tellimine edasimüüjalt

Patsient saab tellida pessaaari kirjutades pessaaari mudeli info meiliaadressile info@hoiamed.ee või helistades Hoiamed OÜ-sse. Pärast arve tasumist saadetakse pessaar lähimasse pakiautomaati.

Tarne

Enamlevinumad pessaaari mudelid ja möödud saab kätte 3–5 tööpäeva jooksul.

Info ja tellimine

+372 5349 7501
info@hoiamed.ee
www.hoiamed.ee
shop.hoiamed.ee